



# Instrucciones De Ajuste De Los Tapones Auditivos

## Claves para una Exitosa Protección con Tapones Auditivos

### Aplicar




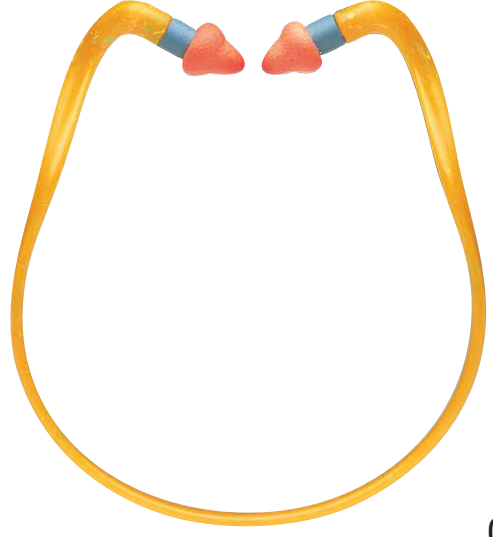
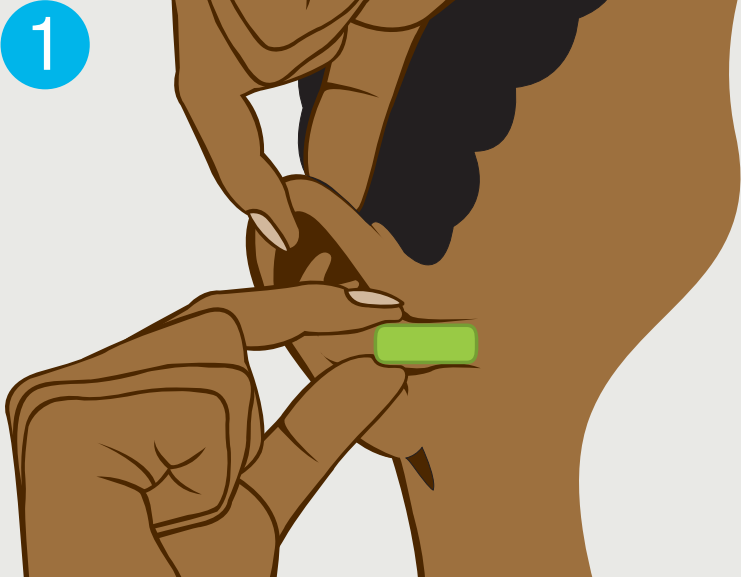
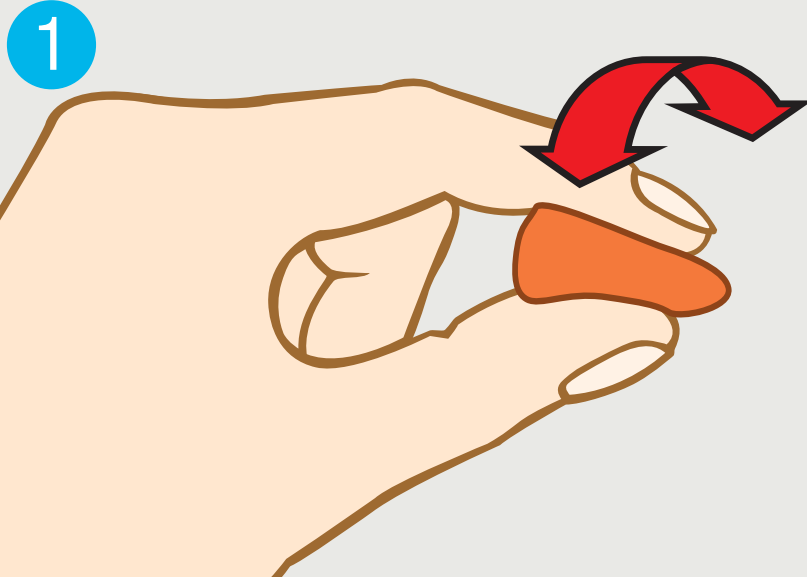
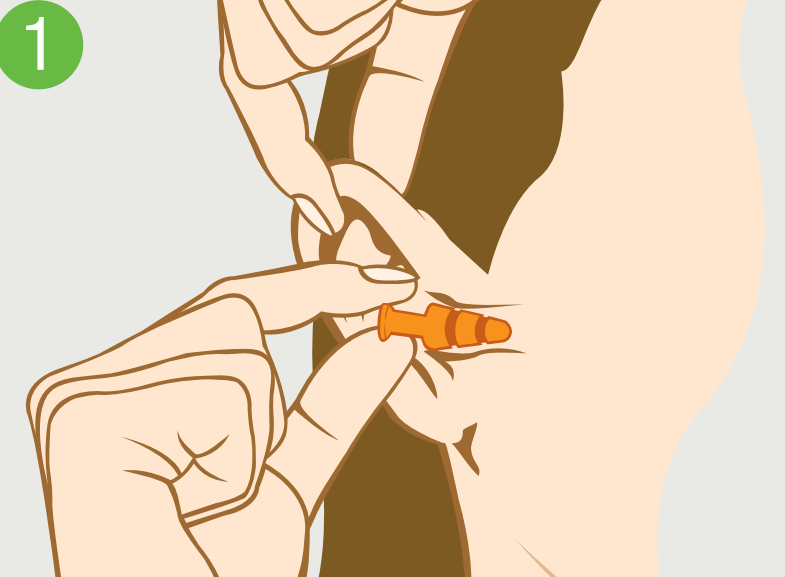
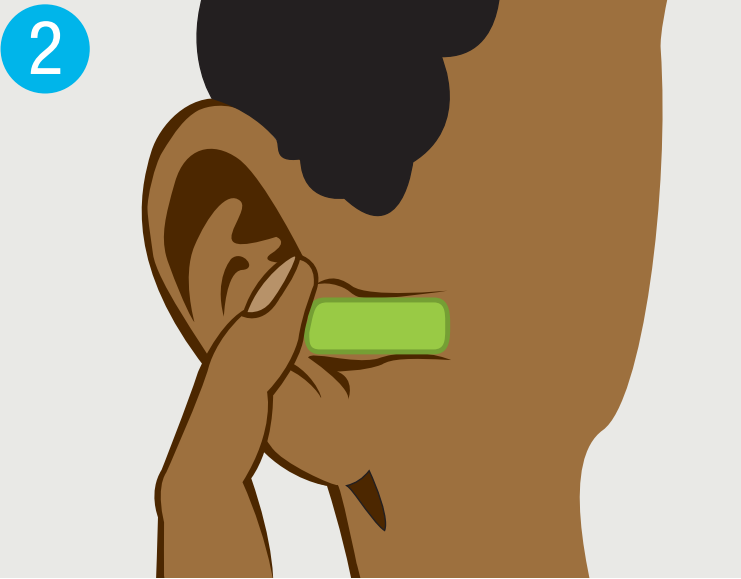


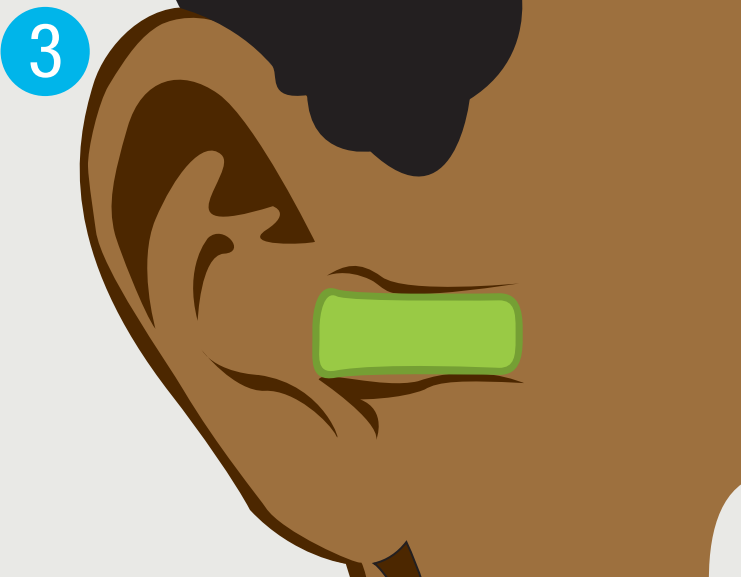
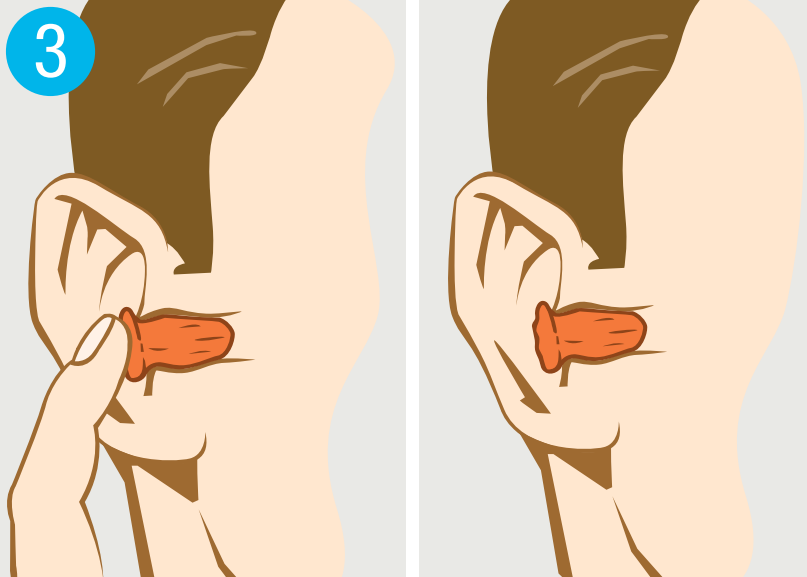

- Lea y siga todas las instrucciones de ajuste de los tapones auditivos

### Selección

- Evite la sobreprotección en ambientes de mínimo ruido – seleccionando el mejor tapón auditivo para su situación, considere niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con otros trabajadores o las señales de alerta auditiva en el trabajo

### Mantenimiento

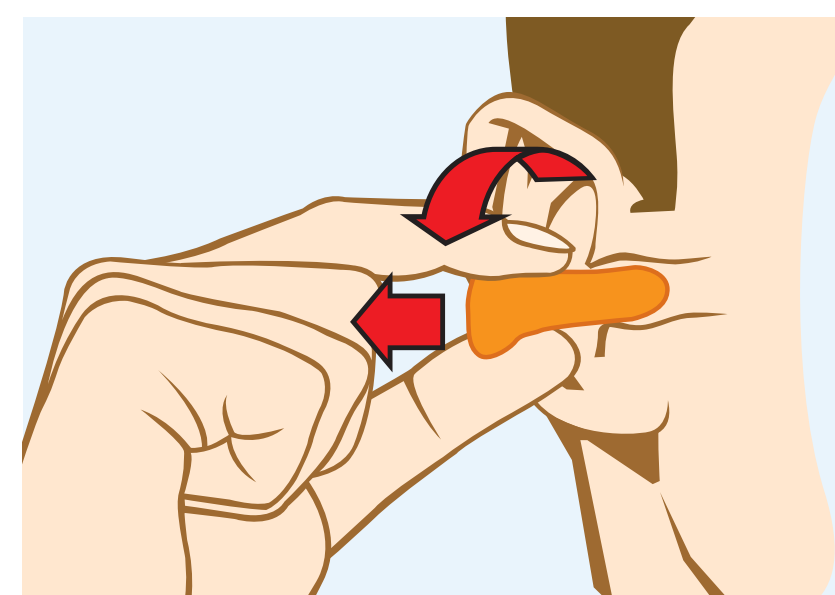
- Inspeccione los tapones auditivos antes de usarlos para detectar polvo, daño o dureza – deséchelos inmediatamente si están dañados
- Para una higiene apropiada, descarte los tapones auditivos desechables después de su uso
- Con un apropiado mantenimiento, los tapones auditivos reusables pueden usarse de 2 a 4 semanas; límpielos con jabón suave y agua posteriormente guárdelos en su estuche cuando los use
- Limpie y reemplace los tapones de las bandas auditivas regularmente

| Espuma No Enrollable  | Espuma Enrollable   | Uso Múltiple  | Con Banda  |
|---|---|---|--|
|  <p>Matrix™</p>  |  <p>Max®</p>   |  <p>SmartFit™</p>  |  <p>QB2HYG®</p>   |
| <p>1</p>  <p>Pase por encima de la cabeza su mano libre, jale su oreja hacia arriba y hacia atrás, e inserte el tapón bien adentro del canal auditivo.</p> | <p>1</p>  <p>Con las manos limpias enrolle el tapón auditivo a la forma cilíndrica más estrecha posible sin arrugar.</p>  | <p>1</p>  <p>Tomando el tapón del tallo, pase la otra mano sobre la cabeza y con cuidado jale su oreja hacia arriba y hacia atrás.</p>   | <p>1</p>  <p>Ponga la banda debajo de su barbilla como se muestra en la imagen. Use sus manos para presionar el tapón dentro de su canal usando un movimiento hacia adentro.</p>            |
| <p>2</p>  <p>El tapón auditivo debe ser insertado como se muestra en la imagen. Deje de empujarlo cuando su dedo toque el oído.</p>                        | <p>2</p>  <p>Pase por encima de la cabeza su mano libre, jale su oreja hacia arriba y atrás, e inserte el tapón bien adentro del canal auditivo.</p>  | <p>2</p>  <p>Inserte el tapón hasta que todas las barreras estén bien adentro de su canal auditivo.</p>                                  | <p>2</p>  <p>El nivel de protección se mejora jalando su oído hacia arriba y atrás para ajustar como se muestra.</p>  |
| <p>3</p>  <p>Si está apropiadamente insertado, la punta del tapón auditivo no estará visible a alguien que lo mire de frente.</p>                          | <p>3</p>  <p>Sosténgalo por 30 o 40 segundos, hasta que el tapón auditivo se expanda por completo dentro del canal auditivo. Si está apropiadamente insertado, la punta del tapón auditivo no estará visible a alguien que lo mire de frente.</p> | <p>3</p>  <p>Si está apropiadamente insertado, la punta del tallo del tapón auditivo estará visible a alguien que lo mire de frente.</p> | <p>3</p>  <p>En un ambiente ruidoso ligeramente presione la banda con sus dedos hacia adentro como se muestra. Usted no deberá notar una diferencia significativa en el nivel de ruido.</p> |

**Qué Hacer y Que No Hacer Con Los Tapones Auditivos**  
**Howard Leight**



**Ajuste Apropiado**  
Para remover, gire cuidadosamente el tapón auditivo mientras lo jala ligeramente con un movimiento hacia fuera.



**Remover**  
Para remover, gire cuidadosamente el tapón auditivo mientras lo jala ligeramente con un movimiento hacia fuera.



**Prueba Acústica**  
En un ambiente ruidoso, con los tapones auditivos insertados, cubra sus oídos con sus manos y quítelas. Los tapones deberán bloquear suficientemente el ruido que al cubrir sus oídos con sus manos no resulte en una diferencia significativa de ruido.